


Manejo de muestras | Refrigeradas

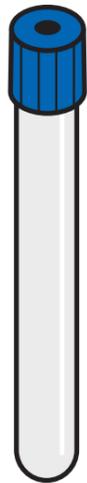

Azul real
K₂EDTA de elementos traza

Aluminio, zinc

- Llène hasta que cese el flujo de sangre.
- Invierta de 5 a 10 veces.
- **No** centrifugue.



Rojo
Activador de coagulación

Fármacos terapéuticos, vitamina D (NY), carnitina

- Llène hasta que cese el flujo de sangre.
- Invierta de 5 a 10 veces.
- Coloque de forma vertical, deje que se coagule (por un mín. de ½ hr. a 2 hrs. después de la extracción).
- Centrifugue después de que la muestra se coagule.



Verde
Heparina de litio

Análisis bioquímicos de rutina, calcio ionizado

- Llène hasta que cese el flujo de sangre.
- Invierta de 8 a 10 veces.
- Centrifugue.



Verde largo
Heparina de litio

Ferritina, hepatitis (HCV, HBsAg, HBsAb, HBcAb), HIV, PTH, vitamina D (no NY)

- Llène hasta que cese el flujo de sangre.
- Invierta de 8 a 10 veces.
- Centrifugue.



Lavanda
K₂EDTA

Hematología, A1c, conteo de células en líquido

- Llène hasta que cese el flujo de sangre.
- Invierta de 8 a 10 veces.
- **No** centrifugue.



Amarillo y blanco
Heparina de litio

Pruebas posdiálisis

- Llène hasta que cese el flujo de sangre.
- Invierta de 5 a 10 veces.
- Centrifugue.



Negro
Sin aditivos

KrU, CrCl, PDA, PET

- Llène hasta que cese el flujo de orina o de líquido.
- **No** centrifugue.
- Para líquidos y orina.

Tapón amarillo y rojo

Análisis de orina

- Siga las instrucciones de recolección en el manual de referencia.



Recipiente estéril

Clostridium difficile
Cultivos de esputo



Amarillo

Cultivos de orina

- Siga las instrucciones de recolección en el manual de referencia.



Tubo de amortiguador para muestra

Sangre oculta, heces

- Siga las instrucciones de recolección en el manual de referencia.
- Proteja de la humedad y la luz ambiental.
- Se puede enviar a temperatura ambiente o refrigerado.




Ambiental

Recipiente estéril con toma de transferencia y tapón amarillo

LAL (incluye UltraPure) y conteo de colonias

- Use un recipiente estéril y 1 o 2 tubos según las pruebas solicitadas.
- Llène el tubo y deseche el recipiente estéril.

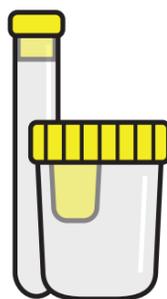


Recipiente estéril

Contaje de colonias UltraPure



Tubo cónico

Análisis de agua

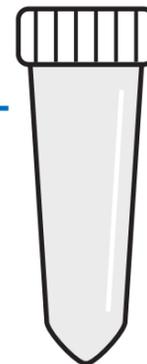

Tapa negra

Electrolitos del líquido de diálisis

