


Etiquetado de muestras

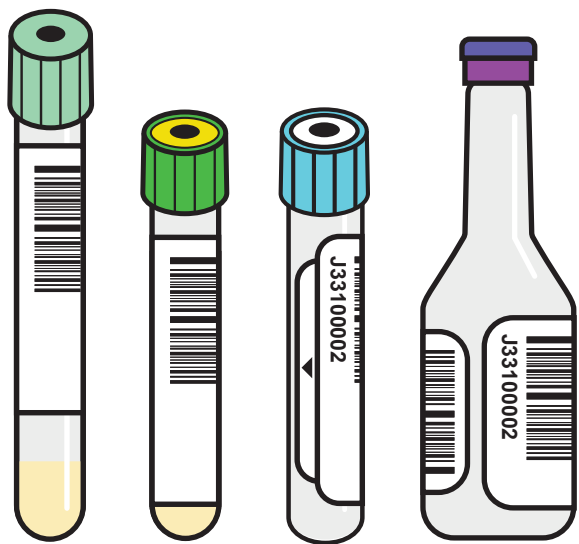

Tubos etiquetados correctamente

- El código de barras y el nombre deben estar orientados lo más cerca posible de la tapa.
- La etiqueta cubre la etiqueta del fabricante.
- Ventana para ver la muestra.
- El nivel indicado o la línea indicada están visibles.
- La etiqueta con el código de barras **no cubre** el código de barras del frasco de cultivo.




Inaceptable

El código de barras y el nombre están orientados hacia el fondo.

Tubos para centrifugación con gel

Inmediatamente después de la extracción

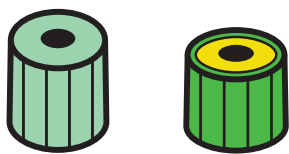


Después de la coagulación
Un mínimo de ½ hora hasta un máximo de 2 horas después de la extracción



15 minutos en la centrífuga de carcasa colgante
20 minutos en la centrífuga de ángulo fijo

Orden de extracción


Orden de extracción	Mezcle invirtiéndolo	Centrifugue	Refrigere
Azul real	5 a 10 veces	No	Sí
Azul claro	4 veces	No	No
Rojo	5 a 10 veces	Sí (después de la coagulación)	Sí
Verde	8 a 10 veces	Sí	Sí
Verde largo	8 a 10 veces	Sí	Sí
Lavanda	8 a 10 veces	No	Sí
Después del orden de extracción	Mezcle invirtiéndolo	Centrifugue	Refrigere
Verde y amarillo	5 a 10 veces	Sí	Sí

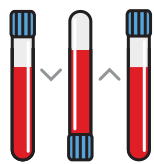

Ejemplo de inversión


Extraiga todas las muestras, excepto la posterior al nitrógeno ureico sanguíneo (posBUN) (verde y amarilla), antes de administrar la heparina.

Cómo empaquetar las muestras

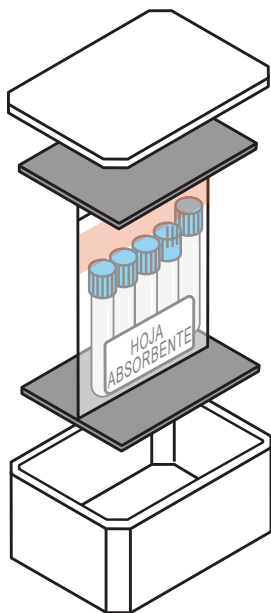

Temperatura ambiente

Es obligatorio utilizar la bolsa de transporte de muestras de riesgo biológico con la hoja absorbente.

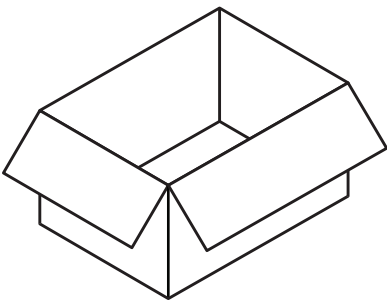

Refrigerado

Congele en forma plana las compresas de hielo.

Es obligatorio utilizar la bolsa de transporte de muestras de riesgo biológico con la hoja absorbente.

Use capas de espuma (foam).

Las muestras no deben tener contacto directo con las compresas de hielo.



Los tubos de tapa azul claro NO PUEDEN enviarse refrigerados.

